

初回 ロタディスク吸入指導報告書 Ver.20180601改定

患者ID: _____

_____ 病院 科 _____ 医師

指導を受けた方:
ご本人 ご家族 その他

調剤薬局名: _____
担当薬剤師名: _____ 先生

指導日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

FAX送信先: 横浜労災病院薬剤部
FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名: _____ 用法用量: _____

薬の準備	カバーを外す。	<input type="checkbox"/>
	目盛りで残量を確認できる。	<input type="checkbox"/>
	フタを垂直になるまで立て、再び閉じる。	<input type="checkbox"/>
吸入	吸入前の息吐きができる。	<input type="checkbox"/>
	吸入口を加え、深く息を吸い込む。 (吸入口をくわえすぎると通気口を塞いでしまうので注意)	<input type="checkbox"/>
	5秒間の息止めができる。	<input type="checkbox"/>
	吸入後の息吐きができる。	<input type="checkbox"/>
片付け	マウスピースをふき取る。	<input type="checkbox"/>
	使用後はディスクを回転させ、残回数を表示してからキャップを閉める。	<input type="checkbox"/>
うがい	うがいができる。	<input type="checkbox"/>
	うがいの必要性を理解している。	<input type="checkbox"/>
残薬確認	次回受診日に吸入薬のデバイスを持参するように説明する。	<input type="checkbox"/>

◆ 症状の評価 (ACT/mMRC ※使用した方に☑して下さい。) 結果 _____


◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由 (デバイス変更は一覧[HP参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。)

◆ 特記事項

(指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。)

ロタディスク 各部位の名称 (薬品名: セレベント、フルタイド)

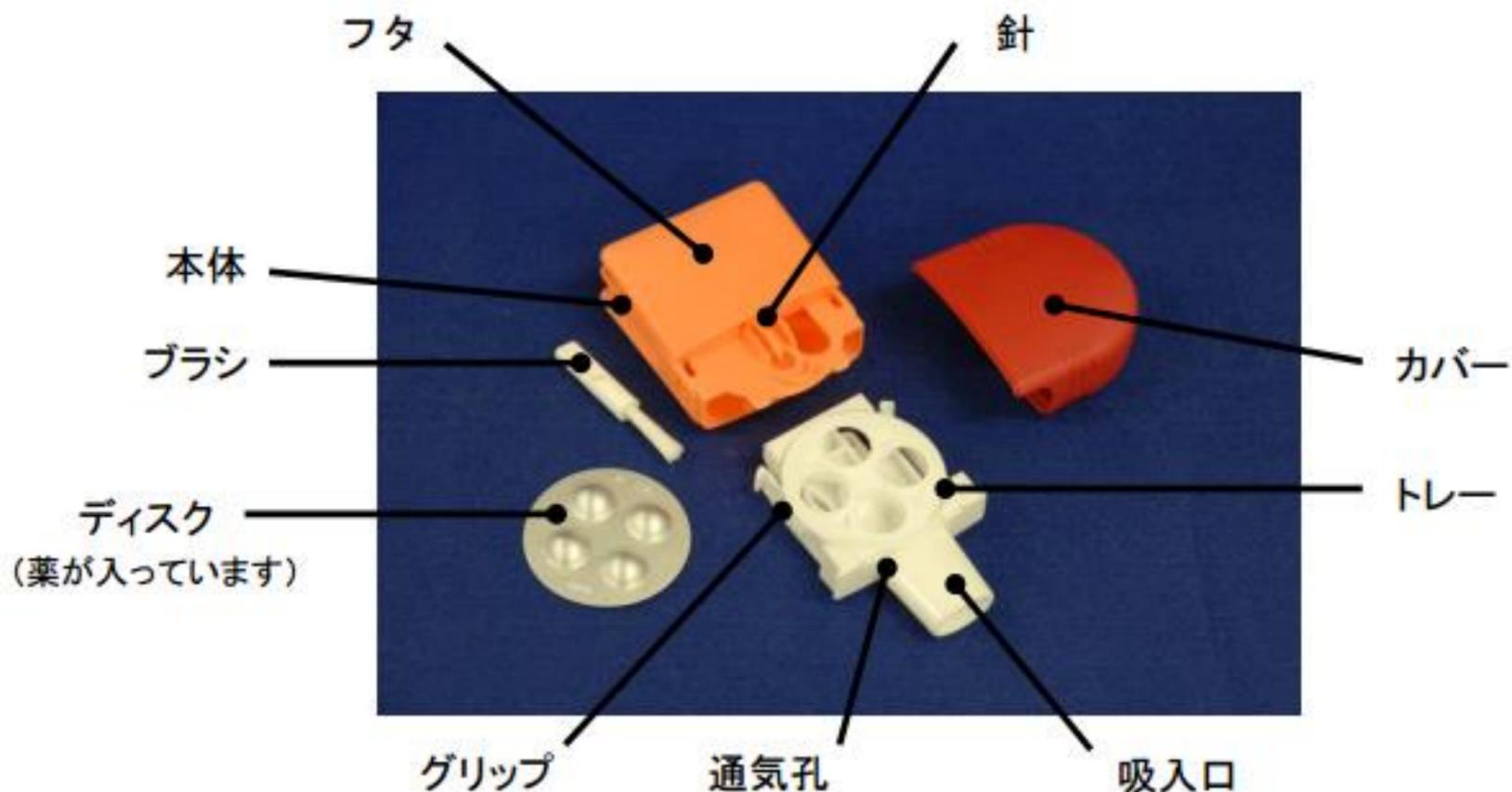

ロタディスクのディスク装着方法 (薬品名: セレベント、フルタイド)

※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)




ディスク
操作
方法

- カバーを外します (A)
- トレーの両端を持って止まるまで引き出します (B)
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
- ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまで押し戻します (E)
- トレーの両端を持って止まるまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)



ロタディスクの吸入手順(患者さん用) 【薬品名: セレベント、フルタイド】

※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください。
※ ディスク装着方法は1枚目(1/2)を参照。

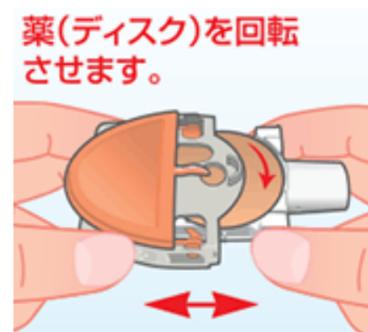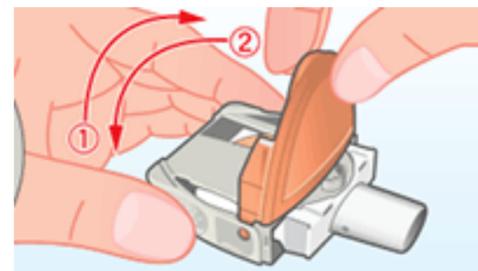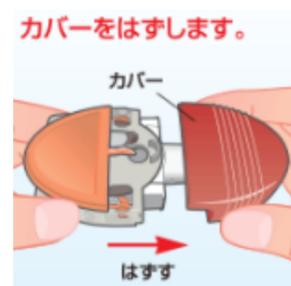

① 薬の準備

- カバーを外します
- 表示窓で残量を確認します
- フタを垂直になるまで立て、再び閉じます
(ディスクに針が貫通し、薬を吸入できる状態になります)

② 息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

③ 吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(吸入口をくわえすぎると、通気孔を塞いでしまうので注意)

④ 息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

⑤ 息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

⑥ 片付け


- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります
使用後はディスクを回転させ、残りの回数を表示してから
カバーをします。

※もう1度吸入をする場合

⑦ うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

ロタディスク 各部位の名称 (薬品名: セレベント、フルタイド)

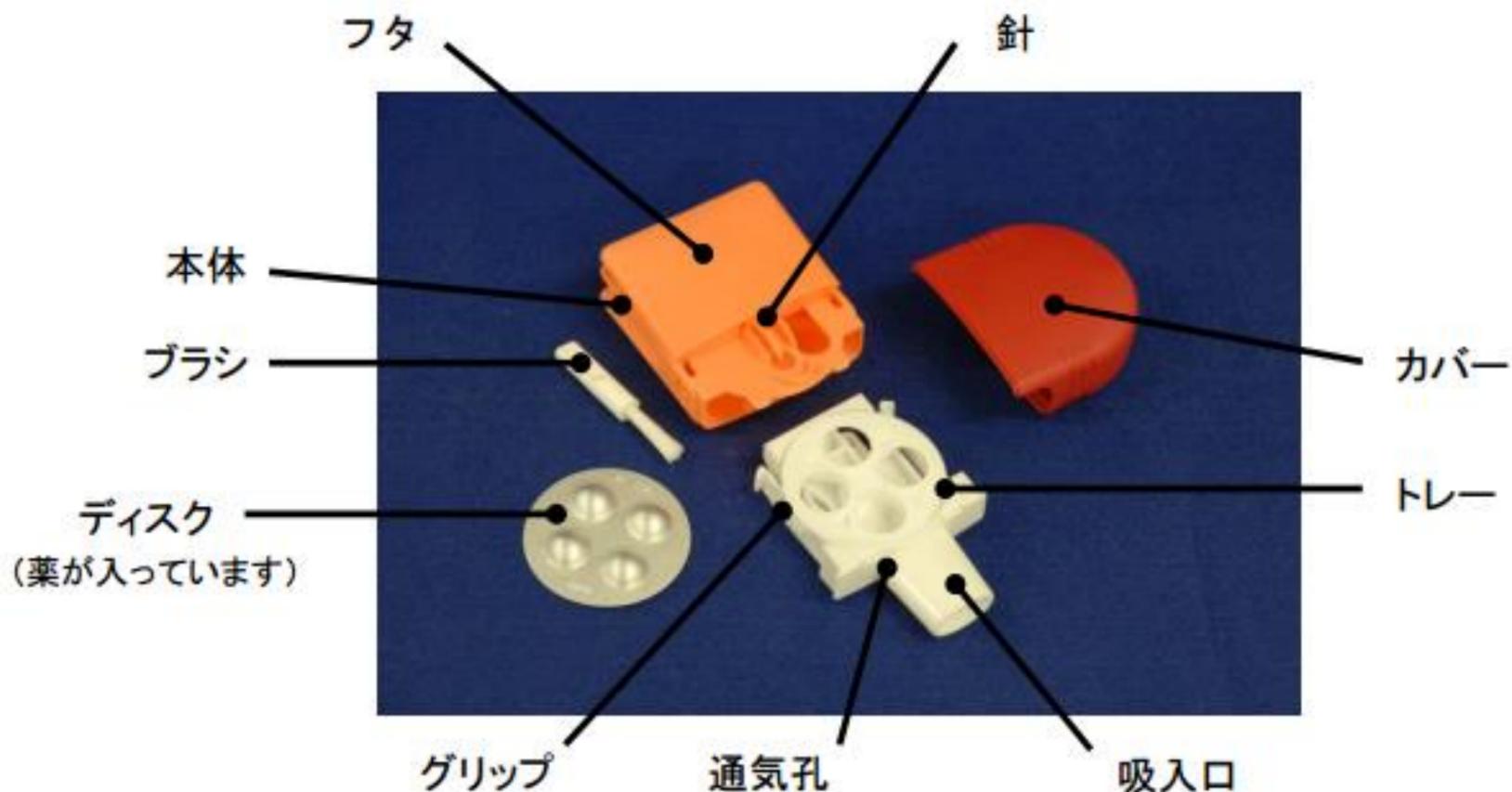

ロタディスクのディスク装着方法 (薬品名: セレベント、フルタイド)

※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)

ディスク
操作
方法

- カバーを外します (A)
- トレーの両端を持って止まるまで引き出します (B)
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
- ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまで押し戻します (E)
- トレーの両端を持って止まるまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)



ロタディスクの吸入手順(薬剤師用)

【薬品名:セレベント、フルタイド】

※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください。
※ ディスク装着方法は1枚目(1/2)を参照。

使い切ったディスクは新しいものと交換します。

①薬の準備

- カバーを外します
- 表示窓で残量を確認します
- フタを垂直になるまで立て、再び閉じます
(ディスクに針が貫通し、薬を吸入できる状態になります)

フタを垂直に立てることでディスクが貫通し、閉じることで吸入の準備ができます。

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

息吐きをしないと、吸入がうまくできません。十分に息吐きができているか確認します。

③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(吸入口をくわえすぎると、通気孔を塞いでしまうので注意)

通気孔を指や唇で塞がないように指導します。

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

肺内への薬剤の沈着率を高めるため息止めが必要です。ただし、無理はさせないこと。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

カバーを閉める前に、吸入口を拭くように指導します。

⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります□
使用後はディスクを回転させ、残りの回数を表示してからカバーをします。

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため吸入後すぐにうがいをします。それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うように指導します。

※もう1度吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。